

CureApp HT 初期設定ガイド

step 1 アプリのダウンロードと処方コード入力

1 アプリをダウンロード

QRを読み取ってアプリをダウンロードしてください。

ダウンロードは
こちらから



2 ダウンロードしたアプリを開く

[はじめての方]を押してください。

CureApp 血圧

はじめての方

アカウントをお持ちの方

ログイン

3 利用目的の選択

次の順でタップ・
押してください。


[医療機関で利用を
案内された方]



[持っている]



[次へ]

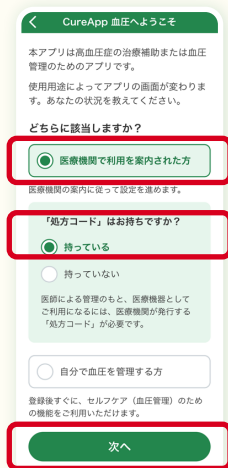


[処方コードの
入力に進む]
を押してください。



すでにCureApp血圧をご利用の方

ホーム画面の一番下にある
[処方コードで切替]を押すと
切り替え画面が表示されますので
処方コードを[持っている]を
押してください。

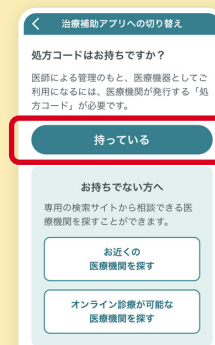

step 2

処方コードを入力して利用を開始

処方コードの入力、またはQRコードを読み取ってください。

処方コード

または

QR読み取り



step 3

基本情報を入力

あなたの情報をアプリに入力

- お名前（ニックネーム）
- 性別
- 生年月
- 身長
- 体重



こちらのニックネームで
呼ばさせていただきますね。

アプリ内キャラクター：千里（ちさと）

これで初期設定完了です！




ホーム画面上部の黄色いバーからアカウント登録できます。

アプリに関する重要なお知らせの受信や、機種変更の際のデータ引き継ぎ、トラブル発生時にアプリが使えなくなることを避けるため、アカウント登録をお願いいたします。




1 アカウント登録をはじめる

[アカウントを登録する]を押してください。

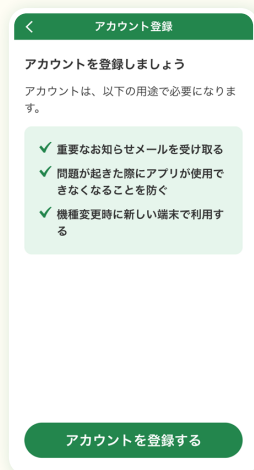

2 メールアドレス登録

メールアドレスを入力してください。

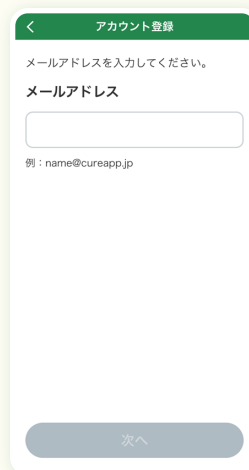

3 メールで確認番号を確認

②で登録したメールアドレス宛に確認番号が送られますのでご確認ください。

こちらに書かれている数字が確認番号です。



4 確認番号入力

アプリを起動し、確認番号を入力してください。



これでアカウント登録完了です！

よくあるご質問

Q 処方コードの有効期限が切れてしまった。どうしたらいい？

A 医療機関に連絡して、期限の延長を依頼すると使えるようになります。

Q タブレットでも使えますか？

A CureApp HTはスマートフォンでのみご利用いただけます。
対応OS:iOS14以上、Android 8.1以上

安心サポート 困った時はご相談ください

webでいつでもさっと解決

CureApp カスタマーサポートに
相談しながら解決

専用ヘルプセンター

アプリ左上の
☰ [メニュー]を開き、
[よくある質問]を選択



<https://ht.help.cureapp.com/>

ht ヘルプセンター



受付時間：月～金 9:00-17:00（祝祭日・年末年始を除く）

 電話相談窓口

03-6778-7280

 メール相談窓口

cureapphelp@cureapp.jp



承認番号:30400BZX00100000

製造販売業者:株式会社CureApp

販売名:CureApp HT 高血圧治療補助アプリ

区分:管理医療機器

一般的名称:高血圧症治療補助プログラム

使用目的又は効果:成人の本態性高血圧症の治療補助

取扱説明書を必ず読み、医師の指導に従って正しく使用してください。
画像はイメージです。

HT00694P02 2025年12月作成



00000020000040